

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

изделия медицинского назначения

ХИЛОЗАР-КОМОД®

Раствор увлажняющий офтальмологический

Не содержит консервантов!

Стерильно

Для закапывания в конъюнктивальный мешок

Состав

1 мл раствора ХИЛОЗАР-КОМОД® содержит:

Натрия гиалуронат (натриевая соль гиалуроновой кислоты) – 1,0 мг

Декспантенол – 20,0 мг

Лимонная кислота безводная, натрия цитрат дигидрат, сорбитол, вода.

Область применения

- Для дополнительного увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаза (роговицы и конъюнктивы), устранения дискомфорта при ощущении “сухости”, чувстве инородного тела, жжении в глазах, в том числе, возникающих под воздействием ношения мягких и жестких контактных линз, климатических факторов, интенсивной зрительной нагрузки
- Для увлажнения, смазывания и ускорения заживления передней поверхности глаза после офтальмологических хирургических операций, а также при повреждениях и травмах роговицы

Свойства

Изделие медицинского назначения ХИЛОЗАР-КОМОД® представляет собой комбинацию водного раствора натрия гиалуроната и провитамина витамина В –декспантенола. Это стерильный раствор, не содержащий консервантов, в оригинальном контейнере (система «Комод»).

Входящая в состав ХИЛОЗАР-КОМОД® **гиалуроновая кислота** (в виде натриевой соли) является природной субстанцией. Натрия гиалуронат является физиологическим полисахаридным соединением, содержащимся как в тканях глаза, так и других тканях и жидкостях организма человека.

Особым физико-химическим свойством молекул натрия гиалуроната является их выраженная способность связывать молекулы воды. Водный раствор натрия гиалуроната обладает необходимой вязкостью и высокими адгезивными свойствами по отношению к

передней поверхности глаза, за счет чего ХИЛОЗАР-КОМОД® образует равномерную, сохраняющуюся в течение длительного времени прероговичную слезную пленку, которая не смывается при моргании и не вызывает снижение остроты зрения.

Таким образом, ХИЛОЗАР-КОМОД® может применяться в течение дня.

Входящий в состав ХИЛОЗАР-КОМОД® дексапантенол (провитамин витамина В), эффективно поддерживает увлажняющие свойства натрия гиалуроната так как также обладает высокой способностью связывать воду.

Применение ХИЛОЗАР-КОМОД® приносит быстрое облегчение при раздражении глаз, способствует снятию усталости, поддерживает здоровое состояние глаз. ХИЛОЗАР-КОМОД® делает ношение жестких или мягких контактных линз более комфортным, при этом ХИЛОЗАР-КОМОД® не откладывается на поверхности линз.

Постоянное и достаточное увлажнение поверхности глаза раствором ХИЛОЗАР-КОМОД® способствует нормальному физиологическому течению и тем самым ускорению заживления повреждений и ран глаза после травм и хирургических вмешательств.

Раствор ХИЛОЗАР-КОМОД® помещен в оригинальный контейнер «КОМОД», который представляет собой сложную систему резервуаров и клапанов, гарантирующую отсутствие проникновения воздуха извне и обеспечивающую извлечение одинаковых по размеру капель вне зависимости от степени приложенного усилия.

Металлические части и клапаны контейнера, контактирующие с раствором ХИЛОЗАР-КОМОД®, частично покрыты тонким слоем серебра, что вместе с абсолютной герметичностью системы обеспечивает стерильность раствора ХИЛОЗАР-КОМОД® при отсутствии в нем консервантов.

Таким образом, исключается возможное нежелательное воздействие консервантов на ткани глаза и обеспечивается хорошая переносимость ХИЛОЗАР-КОМОД® даже при длительном применении.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав раствора ХИЛОЗАР-КОМОД®.

Дозирование, частота и длительность применения

Рекомендуется закапывать ХИЛОЗАР-КОМОД® 3 раза в день в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 1 капле. При необходимости ХИЛОЗАР-КОМОД® можно закапывать чаще. Частота закапывания ХИЛОЗАР-КОМОД® устанавливается индивидуально в зависимости от Ваших ощущений и согласно рекомендациям врача или специалиста по

контактным линзам. Если Вы закапываете ХИЛОЗАР-КОМОД® очень часто (например, более 10 раз в день), пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом.

Не существует ограничений в отношении длительности применения раствора ХИЛОЗАР-КОМОД®. В случае, если после применения ХИЛОЗАР-КОМОД® в течение нескольких дней предъявляемые Вами жалобы или дискомфорт сохраняются, пожалуйста, также проконсультируйтесь с врачом.

Система КОМОД содержит и позволяет извлечь 10 мл раствора ХИЛОЗАР-КОМОД®, это соответствует примерно 300 каплям раствора.

После полного использования содержимого следует приобрести новый заполненный контейнер ХИЛОЗАР-КОМОД®, так как система не предусмотрена для повторного использования.

Способ применения и рекомендации при ношении контактных линз

Перед каждым закапыванием нужно снимать колпачок (см. рис.1 в конце текста).

Пожалуйста, перед первым использованием ХИЛОЗАР-КОМОД® переверните контейнер капельницей вниз и надавите на его основание несколько раз, пока на кончике капельницы не появится первая капля (см. рис.2). После этого система готова к использованию.

При закапывании ХИЛОЗАР-КОМОД® удерживайте контейнер капельницей вниз, быстро и энергично надавливая на его основание. Таким образом, приводится в действие механизм капельницы и извлекается только одна капля раствора. Благодаря особой конструкции клапанов в системе КОМОД® обеспечивается одинаковый размер извлекаемой капли и скорость ее извлечения даже при очень сильном давлении на основание контейнера.

Откиньте голову немного назад, слегка отведите пальцем нижнее веко и закапайте одну каплю в конъюнктивальный мешок, как описано выше (см. рис.3). Медленно закройте глаза, давая возможность жидкости равномерно распределиться по поверхности глаза.

После окончания процедуры герметично наденьте на капельницу колпачок (см. рис.4).

При закапывании следует избегать контактов кончика капельницы с поверхностью глаза и кожей.

При ношении мягких и жестких контактных линз возможно закапывание ХИЛОЗАР-КОМОД® в конъюнктивальный мешок без снятия линз.

Система КОМОД предусмотрена только для индивидуального использования.

Взаимодействие с другими средствами

В случае совместного применения с офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 30 минут между закапыванием раствора ХИЛОЗАР-КОМОД® и

применением глазных капель. Глазные мази всегда должны применяться через 30 мин. после закапывания ХИЛОЗАР-КОМОД®.

Инструкции по хранению

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года.

После вскрытия контейнера раствор ХИЛОЗАР-КОМОД® следует использовать в течение 12 недель.

Отметьте на флаконе дату, когда Вы в первый раз закапали ХИЛОЗАР-КОМОД®. На этикетке флакона предусмотрена специальная графа для заполнения пациентом: «Дата первого применения». Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Инструкции по утилизации

После использования раствора ХИЛОЗАР-КОМОД® выбросите контейнер в мусорное ведро.

Форма выпуска

10 мл раствора ХИЛОЗАР-КОМОД® в оригинальном пластиковом контейнере, помещенном вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Групповая упаковка по 420 единиц продукции в картонной пачке 60 см x 40 см x 40 см.

Условия транспортировки

Всеми видами крытого транспорта при температуре не ниже + 5 °С.

Производитель:

Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ (Ursapharm Arzneimittel GmbH).

Индустриштрассе, 66129 Саарбрюкен, Германия (Industriestrasse, 66129 Saarbruecken, Germany).

Представительство в Москве:

107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр.4.


Тел/факс: (495) 684-34-43.

Для корреспонденции:

129110, г. Москва, а/я 5.

e-mail: ursapharm@ursapharm.ru

Пояснительные рисунки к разделу «Способ применения и рекомендации при ношении контактных линз»

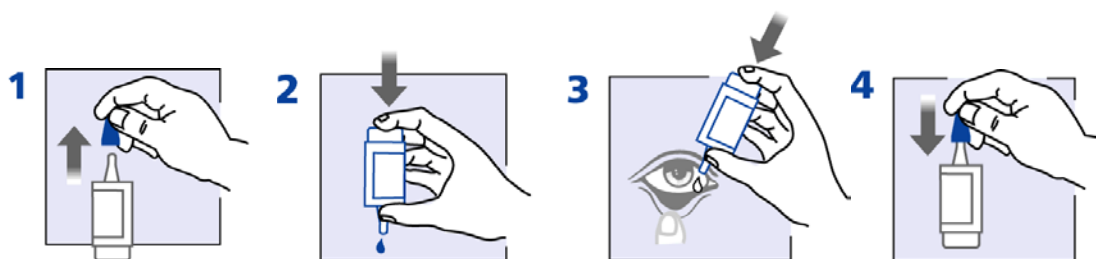

Изделие медицинского назначения “Раствор увлажняющий офтальмологический ХИЛОЗАР - КОМОД® ” зарегистрировано в Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития под номером ФСЗ 2010/06710 от 30 апреля 2010 г. и внесено в государственный Реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Дата составления инструкции: Апрель, 2010.